


SCHEDA TECNICA

MASCARE

MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO CERTIFICATA "TIPO 2"

Buona respirabilità (PA/cm² <40) e alta filtrazione batterica (BFE >98%)

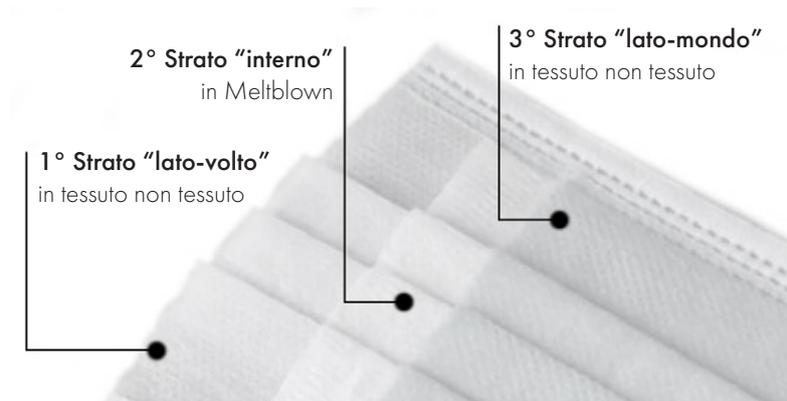

- **1° Strato "lato-volto"** - a contatto con il viso, in morbido tessuto non tessuto.
- **2° Strato "interno"** - Meltblown: blocca le polveri sottili (le PM 2.5).
- **3° Strato "lato-mondo"** - esterno, realizzato in tessuto non tessuto, filtra le particelle più grandi.

Sono dotate di comodo elastico tubolare per le orecchie e stringinaso adattabile. Rifiniture termosaldate. Non sterili.



MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO CERTIFICATA "TIPO 2"

confezione 50 pezzi

cod MASCARETP2

Contiene 5 pratiche bustine
da 10 pezzi caduna





COME INDOSSARLA

È molto importante, prima di utilizzare la mascherina, lavarsi bene le mani, o strofinarle con il gel disinfettante mani a soluzione alcolica.

Per indossarla, bisogna prenderla dagli elastici e portarli alle orecchie, evitando di toccare l'interno della mascherina. Accompagnare il tessuto in modo che copra bene naso e bocca, portando il bordo inferiore sotto al mento.

Stringere la parte flessibile del bordo superiore della mascherina in modo che aderisca bene al naso.

Queste mascherine sono monouso e vanno sostituite una volta utilizzate.

Per toglierla va presa nuovamente dagli elastici facendo attenzione a non toccare la parte interna della mascherina chirurgica.

Una volta gettata nell'indifferenziata, è importante lavarsi nuovamente le mani.



COME SMALTIRLA CORRETTAMENTE

Gettarla nella raccolta indifferenziata, dopo averla inserita in una busta chiusa.

RISPETTA IL PIANETA, NON GETTARMI PER TERRA!



CERTIFICAZIONI


Marchatura CE

Registrata come DM (Dispositivo Medico)
presso il Ministero della Salute
Certificata secondo la normativa EN14683:2019



3 STRATI

Mascherina composta da 3 strati
di tessuto non tessuto

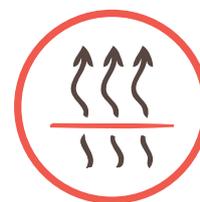

BUONA TRASPIRABILITÀ

Pressione differenziale (Pa/cm² < 40)



ALTA FILTRAZIONE BATTERICA

Efficienza di filtrazione batterica (BFE > 98%)



PERSONALIZZAZIONI

Possibilità di personalizzazione
della mascherina con marchio
impresso in bassorilievo e
delle scatole su quantità minime




PRATICA CONFEZIONE

Acquistabili in scatole da 50 pezzi,
suddivise in 5 pratiche bustine
da 10 pezzi caduna



COMFORT

Comfort assicurato grazie
agli elastici tubolari

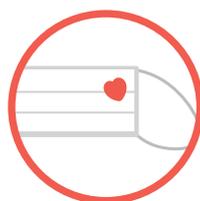

MASCHERINA SOLIDALE

Scegliendo MasCare contribuisce
a un progetto solidale



MADE IN ITALY

Prodotto 100% realizzato in ITALIA
Sosteniamo l'economia locale

P.A.F.O.M.

Fantasy Centro Ave - Loppiano Via Montelfi, 8
50064 Figline e Incisa Valdarno (FI), Italia
tel. +39 055 9051300
infomascare@fantasyloppiano.it



fantasy
lovely by loppiano, italy



www.fantasyloppiano.it

